

# エースクラップ® 滅菌コンテナの機能点検


## ベーシックコンテナ

全ての構成部品に損傷がなく、適切に機能するか使用前に目視点検をしてください。安全にご使用いただくため、取扱説明書に従ってご使用ください。


### 1. 金属の構成部品に変形がないこと



■ コンテナ蓋と底に変形がないこと

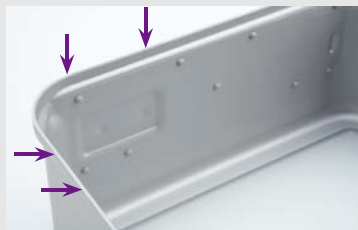


■ コンテナ底の縁にへこみがないこと

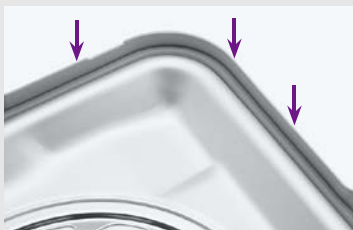

■ コンテナ蓋の縁にへこみがないこと  
■ アルミ製の蓋に反りがないこと

### 2. フィルターリテーナーの確認

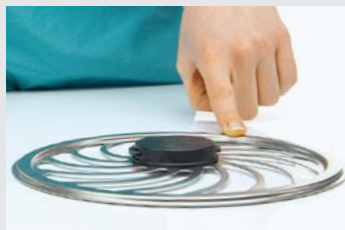

■ フィルターリテーナーに弾性があり、縁全体が水平面に接していること




■ ガasketに疵がないこと



■ ピンの根元がしっかりと蓋に固定され、緩みがないこと

### 3. ガasketの完全性

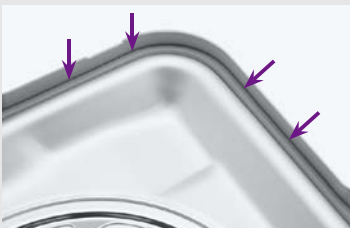

■ ガasketに破損、ヒビ割れ、はがれ、硬化がないこと

### 4. フィルターの点検



■ フィルターによじれ、穴、キズがないこと  
■ 単回使用フィルターは、毎回交換



■ フィルターリテーナーが適切に設置されたことをクリック音で確認

### 5. ロッキングフラップの完全性




■ ロッキングフラップが完全に機能しており、損傷がないこと



■ ロッキングフラップの蝶番を適時パラフィンオイルで潤滑すること

### 6. 蓋と底の密封性

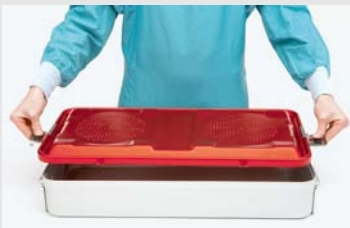

■ 蓋に上から押さえる力を加えず底に装着できること



■ ロッキングフラップを閉じて、しっかりとロックされたことをクリック音で確認

### 7. ハンドルに損傷がないこと



■ ハンドルに目視で確認できるような損傷、変形がないこと

### 8. 滅菌コンテナに損傷がないこと



■ 滅菌コンテナに損傷がないことを確認できた場合のみ、使用すること

### 9. ラベリングと封印



■ 滅菌コンテナが閉じられていること



■ インジケーター付リードシール、または、ラベルとリードシールで封印されていること  
■ 構成部品に損傷が見つかった場合は、速やかに発売元へ連絡し、修理を依頼すること(純正部品と交換等)

AJ-C92802-01 2017.05.xxxxK

AESCLAP®-a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

発売元 **村中医療器株式会社**

〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-3-6

TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360


# エースクラップ® 滅菌コンテナの機能点検 プライムラインプロ

全ての構成部品に損傷がなく、適切に機能するか使用前に目視点検をしてください。安全にご使用いただくため、取扱説明書に従ってご使用ください。


## 1. 金属の構成部品に変形がないこと



コンテナ底と蓋を確認

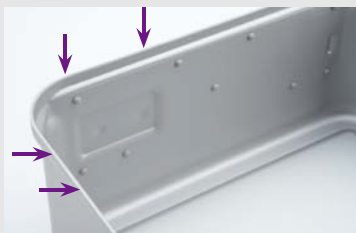


コンテナ底の縁にへこみがないこと

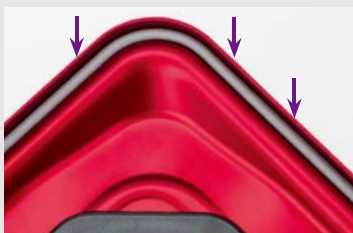

コンテナ蓋の縁にへこみがないこと  
アルミ製の蓋に反りがないこと

## 2. ガasketの完全性

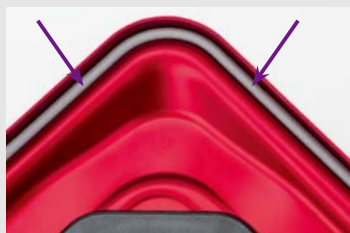

ガスケットに破損、ヒビ割れ、はがれ、硬化がないこと

## 3. フィルターの点検



点検するため、グリッドカバーを外す  
(反時計回りに回転して外す)



フィルターに損傷(よじれ、穴、亀裂)がないこと  
点検中は、フィルターをカートリッジに  
置いたままにしておく

## 4. ロッキングフラップの完全性



フィルターとアダプターフレームの  
三角マークが重なっていること  
(ロックされた状態)



ロッキングフラップが完全に  
機能しており、損傷がないこと



ロッキングフラップの蝶番を適時  
パラフィンオイルで潤滑すること

## 5. 蓋と底の密封性



蓋に上から押さえる力を加えないで  
蓋を底に装着



ロッキングフラップを閉じて、しっかりと  
ロックされたことをクリック音で確認

## 6. ハンドルに損傷がないこと



ハンドルに目視で確認できるような  
損傷、変形がないこと

## 7. 滅菌コンテナに損傷がないこと



滅菌コンテナに損傷がないことを  
確認できた場合のみ、使用すること  
構成部品に損傷が見つかった場合は、速やかに発売元へ  
連絡し、修理を依頼すること(純正部品と交換等)

## 8. ラベリングと封印



滅菌コンテナが閉じられていること  
インジケーター付リードシール、または、ラベルとリードシールで封印されていること

