

# エースクラップ滅菌コンテナの機能点検

AESCLAP Aicon®


**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

全ての構成部品に損傷がなく、適切に機能するか使用前に目視点検をしてください。安全にご使用いただくため、取扱説明書に従ってご使用ください。


## 1. 蓋の点検



■ へこみ、変形がないこと

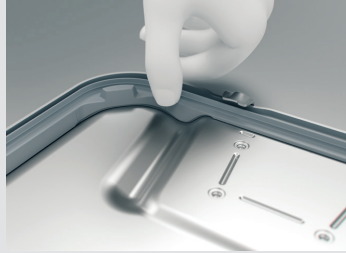


■ ガasketに破損、はがれがないこと

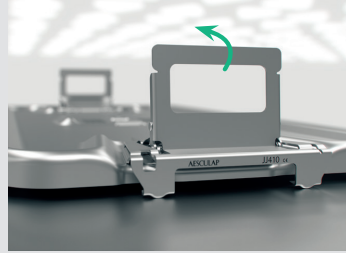

■ ロッキングメカニズムが完全に機能しており、損傷がないこと  
■ 適時パラフィンオイルで潤滑すること


## 2. フィルターリテーナの点検

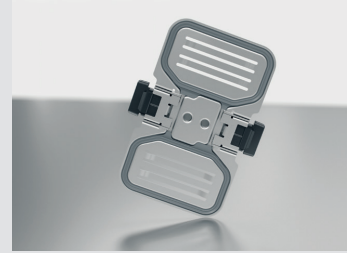

■ へこみ、変形がないこと




■ ガasketにキズがないこと

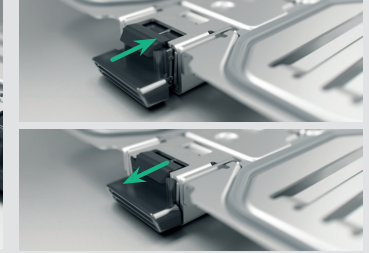

■ フィルターリテーナの押しボタンが完全に機能すること



■ フィルターによじれ、穴、キズがないこと

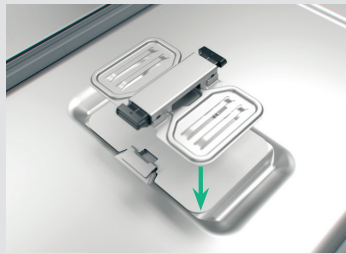

■ フィルターリテーナはパチンという音とともに所定の位置にはまり、全面が接触していること



■ へこみ、変形がないこと



■ コンテナの縁にへこみ、変形がないこと



■ EDSモジュールを下側から上方向に引き上げます




■ 180度回転させて真上へ引き、EDSモジュールを取り外します



■ EDSモジュールに損傷がないこと  
■ ガasketにキズがないこと



■ EDSモジュールを所定の位置に取り付けます

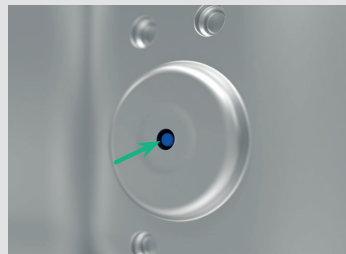

■ 青色の点によりEDSモジュールが所定の位置に取り付けられていることを外側から確認できます

## 5. 蓋と底のセット

■ 底に表示プレートを取り付けコンテナを閉めます

■ ロッキングメカニズムを全開放した状態で蓋と底を確実に合わせ（下に押し込み）、ゆっくりロッキングメカニズムを閉じて固定します



※蓋と底にすれが生じている状態でロッキングメカニズムを閉鎖すると、破損の原因になります



■ コンテナロックを取り付けコンテナが封印されていることを確認すること

■ 滅菌コンテナに損傷がないことを確認できた場合のみ、使用すること

■ 構成部品に損傷が見つかった場合は、速やかに発売元へ連絡し、修理を依頼すること（純正部品と交換等）

AJ\_C03792 2023.03 20005PI

AESCLAP®-a B. Braun brand

製造販売元 **ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

発売元 **村中医療器株式会社**

〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2-3-6  
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360