



Vascular Access

Introcan Safety[®]

イントロカン セーフティ

針刺し事故防止機構付き静脈留置針

Introcan Safety[®]

針刺し事故防止機構付き「イントロカン セーフティ」

安全性と使いやすさを追求した基本設計。

留置針に50年以上の経験を持つビー・ブラウンのアイデアが結集しています。

パッシブセーフティ

- ・内針を引き抜くだけで自動的に安全機構が作動します。
- ・特別な操作が必要なく安全機構が確実に作動します。
- ・針刺し事故防止に貢献します。


だから「パッシブセーフティ」

針刺し事故を防ぐには、今までと同じ手技でしかも誰が使っても同じように安全機構が作動する、シンプルかつ確実な仕組みが必要です。

イントロカン セーフティは、特別な操作をしなくても安全機構が確実に作動するパッシブタイプの安全機構を備えています。これまでの静脈留置針と同じように使えて、針刺し事故防止に高い効果が期待できます。

ラウンドエッジハブ

- ・カテーテルハブの内側を円錐状に加工することで、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
- ・キンク(閉塞)による輸液量低下のリスクを低減します。

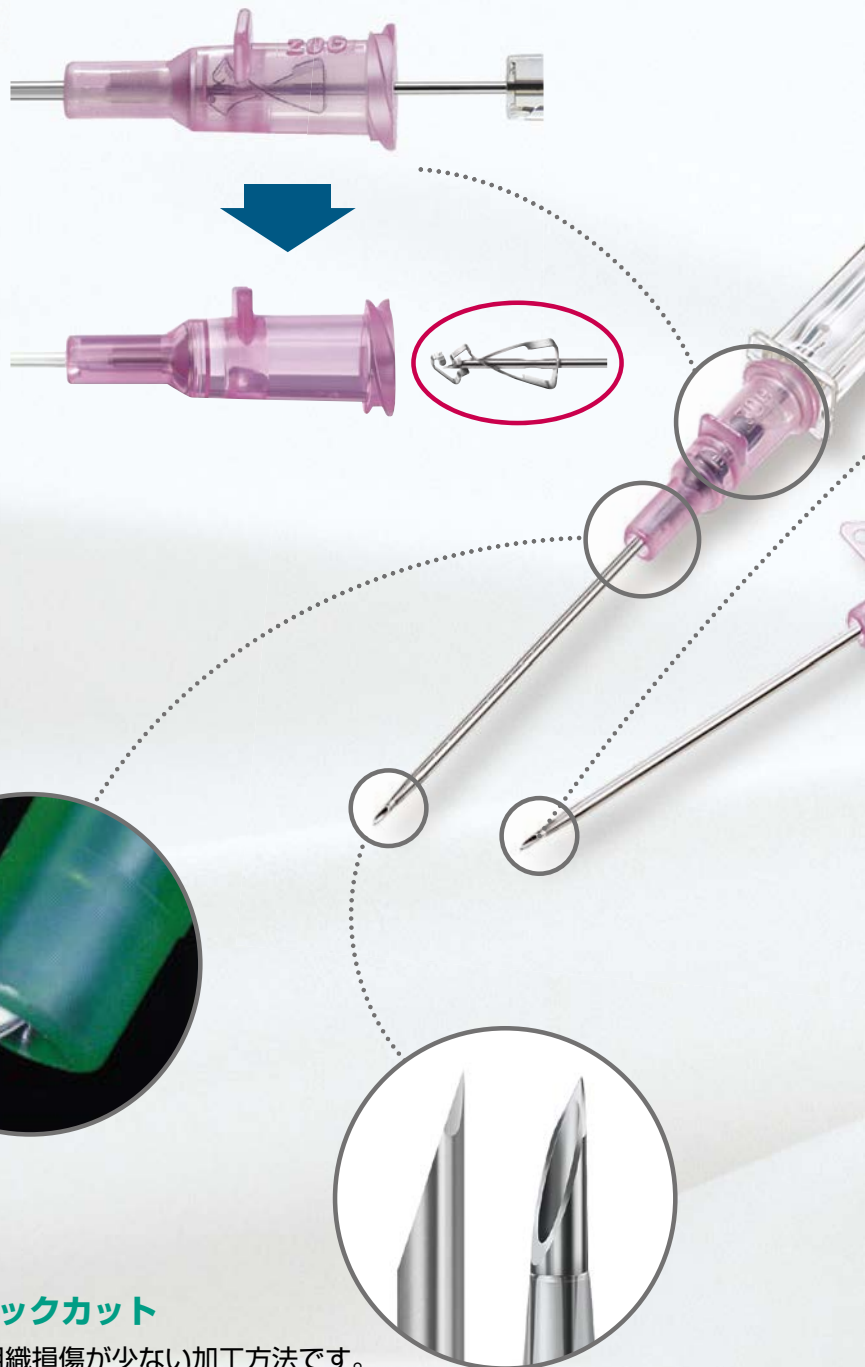


バックカット

- ・組織損傷が少ない加工方法です。


ダブルフラッシュバックシステム

カテーテルの血管外留置(誤留置)を防止でき、より安全・確実に血管内に留置できる逆血の確認方法です。

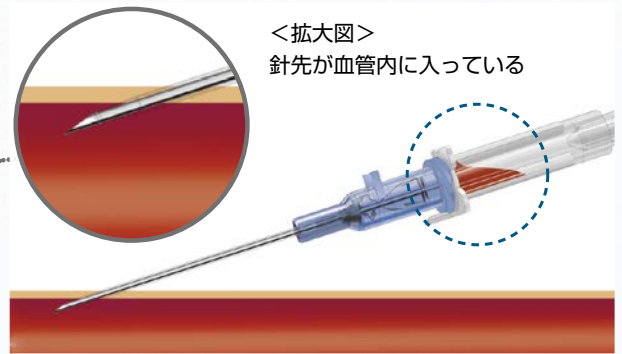

①ファースト(ニードル)フラッシュバック

・穿刺後、針先が血管内に入っていれば、チャンバー内(透明部分)が赤くなります。

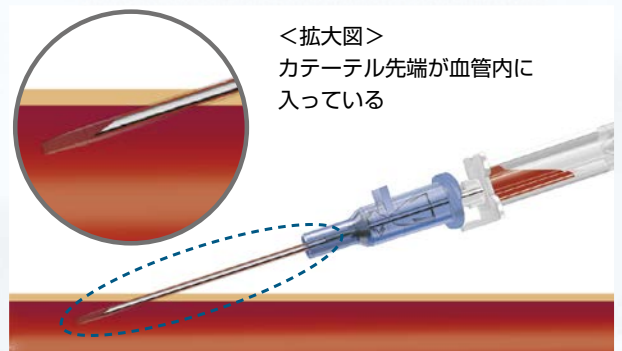

②セカンド(カテーテル)フラッシュバック


・カテーテルを進めた時、カテーテル先端が血管内に入っていれば、カテーテルが赤くなります。

プッシュオフプレート

- ・片手でハブ操作(カテーテル挿入)が出来ます。
- ・カテーテルハブへの接触汚染のリスクを低減します。
- ・刃面の向きが容易に確認出来ます(プレート/上=刃面/上)。

ウィング付き



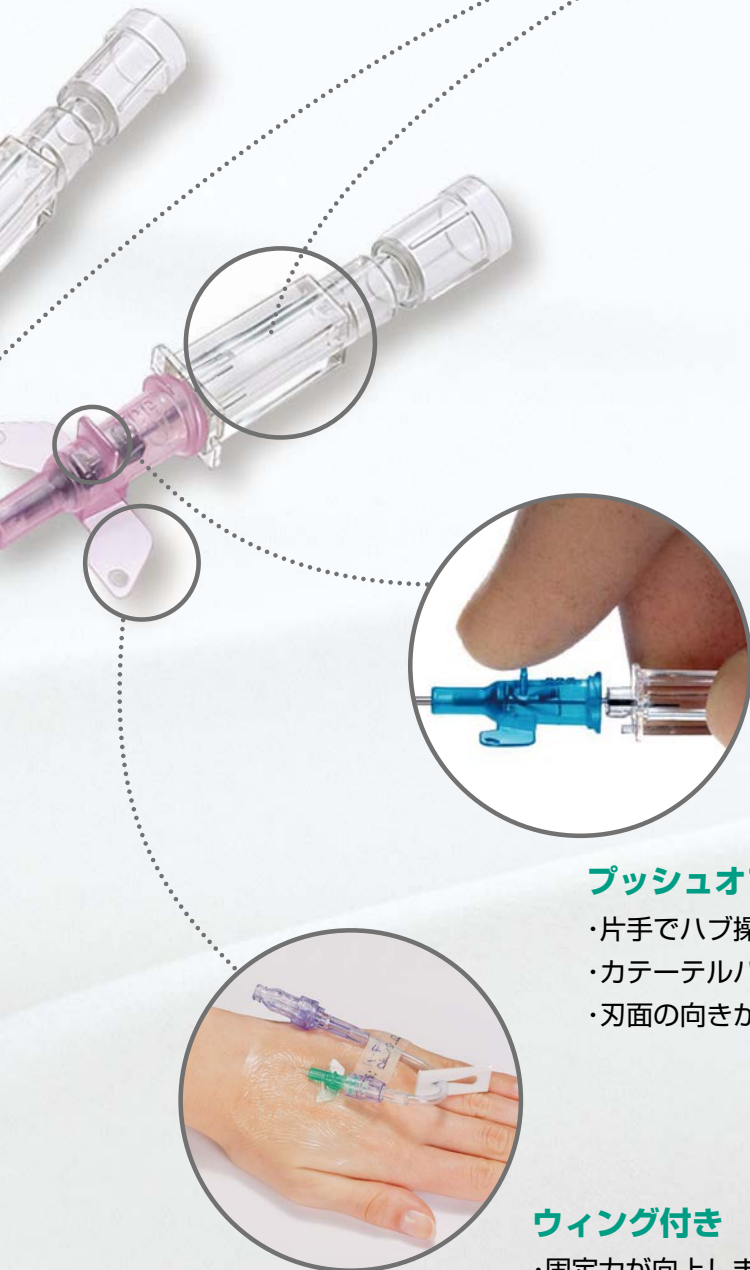




- ・固定力が向上します(自己抜去防止)。
- ・患者様の皮膚トラブルの低減に貢献します。



製品情報

Ordering Information

イントロカン セーフティ

品番	カラーコード	規格	外径	流量	包装単位	販売単位	備考
4251607-03		24G × 14mm	0.7mm	26ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251601-03		24G × 19mm	0.7mm	22ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251628-03		22G × 25mm	0.9mm	35ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251652-03		20G × 25mm	1.1mm	65ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251644-03		20G × 32mm	1.1mm	60ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251687-03		18G × 32mm	1.3mm	105ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251679-03		18G × 45mm	1.3mm	100ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251709-03		16G × 32mm	1.7mm	215ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251695-03		16G × 50mm	1.7mm	210ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251717-03		14G × 50mm	2.2mm	345ml/min	50本入/箱	4箱	—
4251614-03		24G × 14mm	0.7mm	26ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253523-03		24G × 19mm	0.7mm	22ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253540-03		22G × 25mm	0.9mm	35ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253574-03		20G × 25mm	1.1mm	65ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253566-03		20G × 32mm	1.1mm	60ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253604-03		18G × 32mm	1.3mm	105ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253590-03		18G × 45mm	1.3mm	100ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き
4253639-03		14G × 50mm	2.2mm	345ml/min	50本入/箱	4箱	ウイング付き

販売名：イントロカン セーフティ
認証番号：223AABZX00030000
特許第3486169号 特許第3486188号

製造販売元

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

カスタマーサービスセンター

TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)

<http://www.bbraun.jp/>

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。