

消臭潤滑だけじゃない！ ストーマケアの衛生化に

サラヤの技術でエンベロープウイルスや菌にも対応した
「プラス・ハイジーン処方」を新開発
悪臭原因菌を除菌し、臭いのモトを低減します

- 消臭・潤滑
- 除菌*
- ウイルス除去**

*すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
**エンベロープタイプのウイルスで効果を検証。



除菌・ウイルス除去 消臭潤滑剤

オストハイジーン



消臭力

オストハイジーン消臭潤滑剤は、3つの消臭成分(緑茶エキス、トウモロコシ由来成分、銅イオン)を組み合わせることで臭気成分を減少させます。さらに、除菌・抗菌効果で悪臭の原因となる菌の増殖を抑え、臭いのモトを低減します。

潤滑力

ストーマ袋内の衛生に、内容物をスムーズに排出する潤滑性能は重要です。オストハイジーン消臭潤滑剤は、プラス・ハイジーン処方により、優れた潤滑性能を有していることが確認されています。



除菌力

オストハイジーン消臭潤滑剤(60倍希釈)は、悪臭の原因となるグラム陰性菌を99.99%、グラム陽性菌を98%除菌することを検証しました。


オストハイジーン消臭潤滑剤(60倍希釈)の除菌効果

供試菌	処方	対数減少値 (-Log10 CFU/mL)		減少率 (%)	
		20倍希釈	60倍希釈	20倍希釈	60倍希釈
グラム陰性菌	消臭潤滑剤のみの処方	0.03	0.04	7.11	8.20
	プラス・ハイジーン処方	5.90	>6.32	>99.999	>99.999
グラム陽性菌	消臭潤滑剤のみの処方	0.17	0.16	32.039	31.068
	プラス・ハイジーン処方	1.73	1.72	98.139	98.089



抗菌力*(悪臭原因菌の増殖抑制)

オストハイジーン消臭潤滑剤(60倍希釈)は、悪臭の原因となるグラム陰性菌とグラム陽性菌の増殖を阻止する高い抗菌効果を示すことを検証しました。

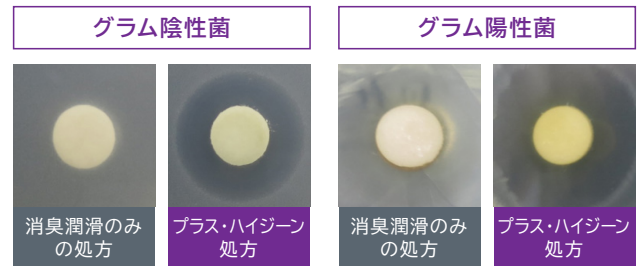

不潔条件下(牛血清アルブミン、綿羊赤血球)にて、60倍希釈試験液と菌を反応させて不活化評価を行いました。

*すべての菌を抗菌するわけではありません



「プラス・ハイジーン処方」でウイルス除去に効果を発揮


除菌・ウイルス除去技術で実績のあるサラヤ株式会社と共同で、消臭・潤滑剤に除菌・ウイルス除去効果をプラスした「プラス・ハイジーン処方」を開発。オストハイジーン消臭潤滑剤は、エンベロープウイルスを99.9%減少させることを検証しました。

オストハイジーン消臭潤滑剤のウイルスに対する効果

ウイルス	初期ウイルス感染価 (TCID50/mL)	作用時間	ウイルス感染価	対数減少値	減少率 (%)
ウイルス A (エンベロープあり)	1.00×10 ⁶	1分	≦2.5	>3.50	>99.9
			≦2.5	>3.50	>99.9
		5分	≦2.5	>3.50	>99.9
			≦2.5	>3.50	>99.9
	7.59×10 ⁵	1分	≦2.5	>3.38	>99.9
		5分	≦2.5	>3.38	>99.9

*>3.50, >3.38:検出限界以下

オストハイジーン消臭潤滑剤のウイルス除去効果

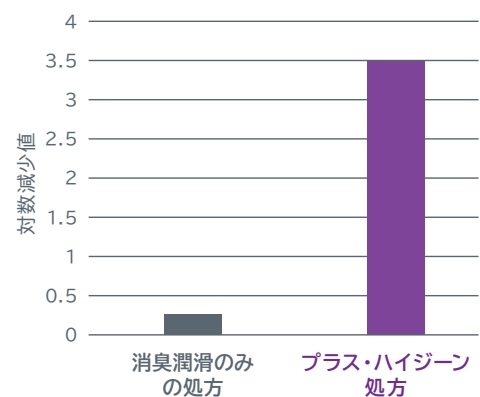

ウイルスと排便の関係性

一部のウイルスは糞便に排出され、感染者が使用したトイレのエアロゾルに検出されます。そして、トイレの水を流すことでウイルスが舞い上がり、屋内に拡散して人の健康にリスクをもたらす可能性があります。



品番	製品名	入数/容量	価格
SRY101	オストハイジーン消臭潤滑剤	1本/250mL	税込価格 2,750円 (本体価格 2,500円)

【使用方法】●ストーマ袋に約8mL(大さじ半分)を投入し、袋内に広げてから装着する。
●装着中に排泄物を処理した際は、もう一度投入し、袋内に広げる。

【成分】精製水、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、消臭成分(銅系、緑茶エキス、トウモロコシ由来)、潤滑剤、溶剤、キレート剤、pH調整剤、黄色203

製造販売元

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里2-2-8

販売元

ビー・ブラウンエスクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

www.bbroun.jp

カスタマーサービスセンター ☎0120-401-741

サンプルのご用命はこちら

