

Ultrasound Device  
超音波診断装置

# Accuro アキュロ

Neuraxial Anesthesia Guidance Device

## ブラインドの手技を プレスキャンでイメージング



Hit the Spot

*Improve the safety, speed, and efficiency  
of epidural and spinal anesthesia.*

- 硬膜外・脊椎麻酔に特化した超音波装置
- 穿刺位置と深度目安の表示
- コンパクトで持ち運びが容易

**Accuro**は持ち運び可能なポケットサイズの超音波装置です。  
プローブ、画面、バッテリーが一体となっておりボタンを押すだけで素早く起動し、  
使用準備に手間が掛かりません。

**Accuro**にはSPINE・BONE・TISSUEの3つのモードが準備されています。

### ■ SPINEモード

硬膜外・脊椎麻酔に特化したアプリケーションで穿刺位置と深度の目安を表示します。

### ■ BONEモード

独自技術によって、骨表面を高い輝度で描出した画像を提供します。

### ■ TISSUEモード

通常Bモードの超音波画像を提供します。



**Accuro**は骨形状から脊椎のどの位置に超音波が向かっているかを自動的に判別をし、至適位置では**オレンジ色**で**椎体モデル**と**穿刺深度目安**を表示します。



SPINE モード参考画面

- 椎間関節までの距離をオレンジ色で表示
- 画面下部の 3DNAVIGATION SPINE がサポート



小型装置なので助手の手を必要とせず麻酔処置者1人での取扱いが可能です。



専用プローブカバー（別売：品番4741）を用いる事で清潔領域での使用も可能です。

※メーカー3年保証も用意しております。保証内容の詳細は、弊社担当にお問い合わせ下さい。

品番	品目	販売単位
901-00002	Accuro	1台
4741	Accuro プロープカバーキットロケーター付24個入	1箱

#### ■ 主な仕様

使用時最大サイズ：5.1cm×6.5cm×16.5cm  
 重量：310g  
 ディスプレイサイズ：3.5インチ(4.9cm×7.3cm)  
 最大描出深度：12.5cm  
 描出モード：SPINEモード・BONEモード・TISSUEモード  
 プロープ：セクタープロープ  
 周波数：5 MHz  
 連続使用時間約：90分  
 バッテリータイプ：リチウムイオン  
 機器分類：クラスII 内部電源機器

#### ■ 構成品 (品番：901-00002)



Accuro本体



USB電源アダプタ




キャリーケース



Micro USBコード

#### ■ 構成品 (品番：4741)

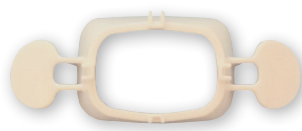


ロケーター



超音波用ジェル



プロープカバー

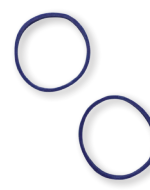

ゴムバンド 2本

全ての構成品は外包シートにくるまれた状態で滅菌されています。

#### 製造販売元

**ビー・ブラウンエースクラップ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

**カスタマーサービスセンター**

TEL 0120-401-741 (フリーダイヤル)

<http://www.bb Braun.jp/>

販売名：超音波診断装置ACCURO

認証番号：229AFBZX00052000

販売名：ACCURO プロープカバー

届出番号：13B1X00218412001

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。  
 製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。